

ReNew™ Séchoir / rafraîchisseur d'aides auditives

Guide de l'utilisateur

(Séchoir d'aides auditives et testeur de piles)

Merci d'avoir acheté ReNew Séchoir / rafraîchisseur; Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation d'appareils électriques des précautions de base devraient toujours être suivies, incluant celles-ci:

- 1. Lire entièrement les instructions avant l'utilisation.
- 2. Pour réduire les risques de blessures, la supervision d'un adulte est conseillé, si utilisé près d'un enfant.
- 3. Ne pas regarder directement les deux lampes UV situées dans les coins avant de la chambre de séchage.
- 4. N'utilisez que des accessoires vendus par le fabricant.
- 5. Ne pas utiliser à l'extérieur ou près de l'eau.
- 6. Pour débrancher l'appareil, mettre tous les contrôles à "OFF" et ensuite débrancher le de la prise murale.
- 7. Ne jamais tirer sur le fil, tirez plutôt sur la prise.
- 8. Lorsqu'il ne sert pas, débranchez toujours l'appareil ainsi qu'avant l'entretien ou le nettoyage.
- 9. Ne jamais faire fonctionner un appareil ayant le fil, ou la prise électrique endommagés, ou suite à une panne de celui-ci, si il a été échappé ou endommagé de quelque façon. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus près de chez vous pour évaluation, réparation, ajustement électrique ou mécanique.

- 4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer le cycle de séchage. Appuyez sur la touche REFRESH pour activer le "UV" la lumière pendant une heure (en option).
- Attention: Ne pas regarder directement les deux lampes UV dans les coin avant de la chambre de séchage.
- 5. Retirez les prothèses et essuyez l'excès de cérumen

Test d'une pile:

- 1. Placez une pile contre les bornes du testeur. Assurez-vous que le plus petit coté arrondi (-) soit placé sur le disque doré.
- 2. Poussez sur la pile de façon a ce que le coté (+) touche au terminal vertical doré.
- 3. La force de la pile est indiquée par le nombre de lignes allumées. 4 ou 5 lignes indiquent une pile ayant encore un bon voltage. 1 ou 2 lignes indiquent que la pile est faible et sera bientôt à remplacer.
- 4. Avant de tester une pile neuve, retirez la languette et attendez deux minutes afin de laisser le voltage de la pile se stabiliser.

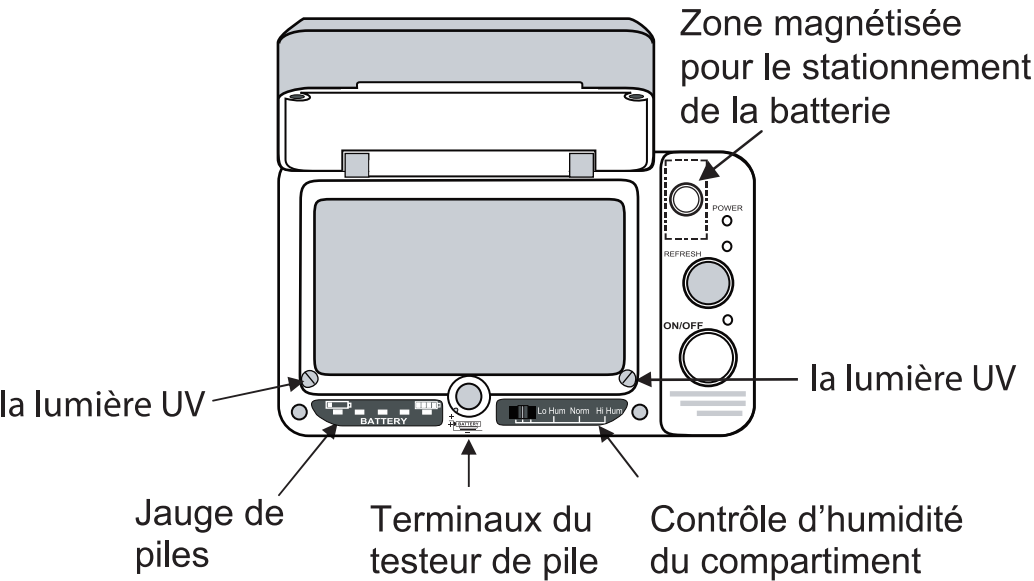

Cycles de séchage:

- 1. Branchez l'adaptateur CA à l'appareil et l'autre bout dans une prise murale. L'indicateur de courant devrait s'allumer
- 2. Ajustez le réglage d'humidité du compartiment selon le temps de séchage.
"Low Humidity" = 2 heures
"Normal Humidity" = 4 heures
"High Humidity" = 8 heures
- 3. Ouvrir la porte de la pile de l'aide auditive pour la sécher également. Placer les prothèses dans le compartiment de séchage et refermer son couvercle. Ou, vous pouvez retirer la batterie et la conserver sur le parking magnétiques. Réinstaller la batterie après le cycle de séchage est terminé.

ReNew ; Spécifications @ 25°C air ambiant:

1	Températ. chambre (mesure à 5 mm au dessus du centre)	45 +/- 5°C
2	Lumière UV (sur temps max=1 heure)	400 nm; < 100mw
3	Minuterie de séchage	2 h, 4h, 8h
4	Taux d'évaporation d'humidité (testé avec de l'eau dans un tube de plastique de 2 mm)	Évapore 18 mm ³ d'eau après 4 heures de séchage à 60% H.R.
5	Indicateurs de voltage de la pile	5
6	Entrée adaptateur CA	100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz
7	Sortie adaptateur CA	12VDC, 1000MA
8	Protection contre surchauffe	RPT et thermostat
9	Températ. de fonctionnement	0 à 40°C
10	Températ. entreposage	-10 à 50°C
11	Dimension (mm)	148x89x51 (5.8"x3.5"x2")
12	Poids (g.)	430 (15 On.)

Information sur les garanties de service

ReNew vient avec une garantie limitée d'un an. Nous garantissons durant cette période, à partir de la date d'achat, à l'acheteur original, que ReNew est exempt de tous défauts matériels ou de main d'œuvre dans le cadre d'un usage personnel. Au cas ou ReNew ne fonctionnerais pas correctement durant la première année suivant l'achat, dû a un défaut matériel ou de main d'œuvre, retournez l'appareil (à nos frais) avec la prevue d'achat (reçu de caisse, bon de livraison ou autre) à Serene Innovations. Serene Innovations réparera ou remplacera l'appareil (avec un appareil réusiné ou de qualité égale) et vous le retournera (par UPS/USPS postes USA) sans frais pour vous (Il y aura des frais d'expédition nominal supplémentaire si elle est expédiée à l'extérieur côté les 48 états américains Continental).

Cette garantie a cours légal, les recours légaux peuvent varier selon la législation locale.

ReNew™ est une marque de commerce de Serene Innovations, Inc.



Serene Innovations, Inc.
14731 Carmenita Road, Norwalk, CA
Tél: 562 407 5400 www.sereneinnovations.com